

Firmware Update 22.1

Um Oticon More noch besser zu machen, haben wir für alle Oticon More miniRITE R und miniRITE T Hörsysteme ein Firmware Update entwickelt. Die Firmware wird auf Version 1.3.0 geupdated.

Um alle neuen Updates zu erhalten, müssen Sie nur die Hörsysteme mit Oticon Genie 2 - 2022.1.0 - verbinden und den Hörsystem-Updater ausführen. Der Hörsystem-Updater funktioniert unabhängig davon, ob Sie in Ihrem Fachgeschäft online oder offline sind.

Neue Features	Technische Details	Kundenvorteile
Freihändig Kommunizieren für ausgewählte iPhone®- und iPad®-Geräte.	Software-Update zur Kompatibilität mit dem neuen LEA 2.0-Protokoll (Low Energy Audio 2.0) von Apple, welches das freihändige Kommunizieren möglich macht.	Hörsystemträger können jetzt freihändig telefonieren mit Oticon-Hörsystemen als Headset. Verfügbar ist dieses Feature für iPhone® 11 (ab iOS 15.2) und iPad® (ab iPadOS 15.2).
Lautstärkeeinstellung - TV Adapter 3.0	Software-Update, mit dem die Einstiegs-Lautstärke, bei erstmaliger Verwendung des TV-Adapter 3.0, auf ein angenehmeres Niveau angepasst wird.	Die Anfangslautstärke für das Streaming ist - bei erstmaliger Verbindung mit dem TV Adapter 3.0 - für den Nutzer angenehmer. Für das erneute Streaming merken sich die Hörsysteme die zuletzt vom Nutzer verwendete Lautstärkeeinstellung.
Lautstärkeregelung - TV Adapter 3.0	Die Schrittweite des Lautstärke-stellers wurde auf 2 dB pro Klick erhöht, wenn vom TV Adapter 3.0 gestreamt wird.	Lautstärkeänderungen sind für den Nutzer beim Streaming über TV Adapter 3.0 besser hörbar.

Falls die Hörsysteme bisher noch nicht mit den letzten Updates aktualisiert wurden, erfolgt dies automatisch mit dem neuen Firmware Update. Um mehr über den Umfang vorheriger Updates zu erfahren, schauen Sie bitte in die Firmware Update-Historie.



How to - Firmware Update durchführen

Bevor Sie ein Firmware Update durchführen

- Bitte beachten Sie, dass die Hörsysteme während des Aktualisierung nicht getragen werden dürfen, sondern bspw. auf dem Tisch abgelegt werden.
- Bitte beachten Sie, dass die Hörsysteme während der Aktualisierung ausreichend geladen sind (Akku bzw. Batterie).
- Die Hörsysteme dürfen während des Aktualisierung nicht entkoppelt werden, da dies zum Abbruch des Firmware Update führen kann.

How to - Firmware Update durchführen

1. Verbinden Sie die Hörsysteme mit Oticon Genie 2.
2. Wenn ein neues Firmware-Update verfügbar ist, wird es als Benachrichtigung in der oberen rechten Ecke des Genie 2-Bildschirms angezeigt (Glocken-Symbol). Klicken Sie auf die Benachrichtigung und dann auf "Hörsystem- Updater". Nun sollten Sie auf die Seite des Updater weitergeleitet werden, wo Sie sehen können, welche Updates verfügbar sind.
3. Klicken Sie unten auf "Aktualisieren", daraufhin öffnet sich ein Fenster zur Geräteaktualisierung. Klicken Sie erneut auf "Aktualisieren" und warten Sie, bis die Hörsysteme auf den neusten Stand sind. Wenn das Firmware Update durchgeführt wurde, wird es unter "STATUS" auf dem Bildschirm angezeigt.
4. Jetzt sind die Hörsysteme aktualisiert und Sie können mit Ihrer Anpassung in Genie wie gewohnt fortfahren.